


MTW-01 제품정보

내시경 수량	세척방법	화면표시방법	방수체크기능
1개	360° 회전분사	FnD	✓
소독제필터	소독제사용횟수기록	알코올&에어건	

✓ ✓ Option

MTW-01 제품특징

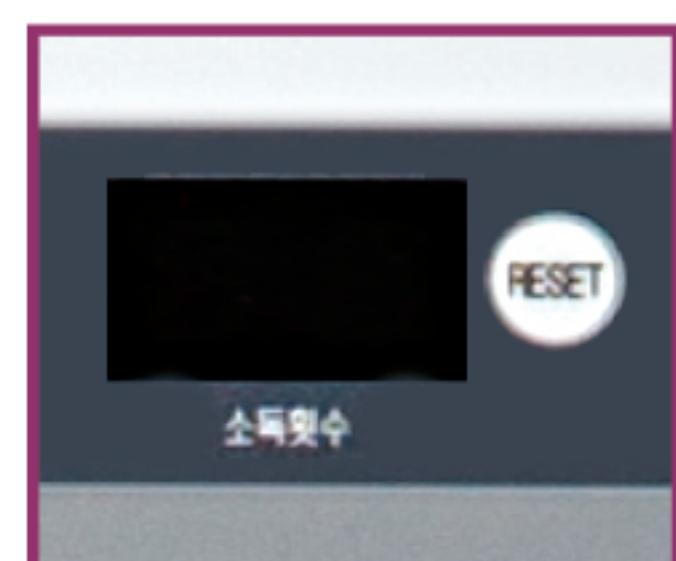

소독 횟수 카운트

사용자가 소독액을 몇 번이나 사용했는지 확인 가능하여 교환주기 판별에 용이



내시경용 컨넥터

내시경 채널 내부 세척·소독용 컨넥터



최적화 챔버

내시경기기 세척·소독에 최적화된 챔버



도어 센서

기기 동작 중, 문이 열릴 시 기기 자동 멈춤 기능



단단하게 고정된 챔버 커버

자석타입으로 되어 있어 잣은 사용에도 흘러내리지 않도록 고정되어 사용자의 편의성 향상



MTW-01 사용방법 및 순서



Manual

Scope Setting ▶ Leakage test (Waterproof) ▶

Automatic

Air ▶ Washing ▶ Air ▶ Disinfecting ▶ Air ▶ Rinse ▶ Air ▶ Alcohol (Option)



※ 세척 및 소독시간은 사용자에 의해 변경 가능

Quick 소독

Air ▶ Disinfecting ▶ Air ▶ Rinse ▶ Air ▶ Alcohol (Option)

MTW-01 제품사양

내시경 누수 테스터	내시경 방수체크
시간설정 (사용자 설정)	1) 세척시간 : 0 ~ 55초/60분 2) 소독시간 : 0 ~ 55초/60분 3) 린스시간 : 0 ~ 55초/60분 4) 알코올 : 0 ~ 60초 (옵션)
펌프	누수 체크 펌프, 에어 펌프, 배수 펌프, 소독액 펌프
챔버용량	약 8 L (소독액 탱크 : 9 L)
탱크용량	알코올 1L (옵션)
배출	소독액 잔량 배수호스 1개
전압/주파수	AC 220V, 60Hz
소비전력	350W
크기 (WxDxH)	518 x 730 x 975 mm (커버 닫힘) 518 x 730 x 1510 mm (커버 열림)
중량	58kg



Huons Medicare

(주)휴온스메디케어

본사 : 부산광역시 강서구 녹산산단165로 22 Tel. 051-831-1030 Fax. 051-831-1040

공장 : 인천광역시 부평구 안남로 418번길 27, C동 401호

제품문의 : www.huonsmedicare.com Tel. 070-7410-8991