

신제품 출시

일반의약품 | 분류번호 : 732

내시경기기 살균 소독에 효과적인 소독제!!

테라크린 액(5L)

(글루타랄농축액)

Glutaraldehyde 2.1%

- Glutaraldehyde 성분의
내시경 기기 소독제
- 편리성 Yes! 소독력 Yes!
글루타랄농축액 20% 제품과 달리
별도의 완충화제 혼합 없이
사용 가능
- 일반의약품 허가 제품
- 규격 : 5L X 4통



Drug Information

일반의약품 | 분류번호 : 732

【원료약품의 분량】 100 mL 중

글루타랄농축액(USP) 4.2g
(글루타르알데히드로서 2.1g)

【성 상】

흰색 플라스틱 용기에 든 약간의 특이한 냄새가 있는 미황색의 투명한 액제

【효능·효과】

의료 기구의 살균 소독 : 렌즈 부착의 장치류, 내시경류, 마취장비류, 인공호흡장치류, 메스, 카테-터 등의 외과 수술용 기구, 산부인과, 비뇨기과용 기구, 치과용 기구 또는 보조 기구, 주사기, 체온기

【용법·용량】

1. 장비나 의료기기를 세척제를 사용하여 미리 잘 세척한 후 행군다.
2. 행군 후 희석하지 않은 약액을 붓고 멸균시에는 35℃에서 7시간 40분 동안, 고도의 살균 시에는 35℃에서 5분 동안 또는 25℃에서 20분 동안 충분히 담근다. (움푹 파인 부분이나 바늘은 잘 닦은 후에 약액을 채운다.)
3. 기구의 5배의 물로 기구를 담구어 행군다.
(이렇게 하는 것은 글루타르알데히드의 잔재로부터 환자에게 노출을 방지한다.)
- 살균된 장비는 살균된 물을 사용한다.

【사용상 주의사항】

1. 부작용
 - 1) 피부 : 피부와 접촉하면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등의 과민증상을 일으킬 수 있다.
2. 적용상의 주의
 - 1) 고무나 플라스틱 PVC로 만들어진 제품에는 사용하지 않는다.
 - 2) 용액의 색깔이 바뀌거나 흐리게 된 경우는 즉시 폐기한다.
 - 3) 인체에 사용하지 말 것.
 - 4) 오염을 피하기 위하여 보관 및 취급 시 충분히 주의할 것.
 - 5) 눈에 들어가지 않도록 안경 등의 보호구를 착용하는 등 충분히 주의하여 취급할 것. 잘못하여 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로써 씻어내고 전문의의 처치를 받을 것.
 - 6) 글루타랄 증기는 눈, 호흡기 등의 점막을 자극하므로 흡입 또는 접촉되지 않도록 주의할 것.
 - 7) 본 제품을 취급할 경우에는 고무장갑을 착용할 것. 또한 피부에 부착시는 즉시 물로 씻을 것.
3. 취급상의 주의
 - 1) 뚜껑이 있는 용기를 사용하여 침적 시에는 뚜껑을 덮을 것.
 - 2) 사용 후에는 오염과 증발을 피하기 위해 용기의 마개를 잠글 것.
 - 3) 글루타르알데히드에는 일반적으로 단백응고성이 있으므로, 내시경에 부착되어 있는 체액 등을 제거하기 위해, 예비세척을 충분히 한 후, 사용할 것.
 - 4) 소독이 끝나면 다량의 물로써 본 의약품을 충분히 씻어낼 것.
 - 5) 이 용액은 개봉 후 28일까지 사용가능.
 - 6) 용기 폐기를 위해서 물과 함께 완전히 행구어 버릴 것.

【저장방법】 기밀용기, 1~25℃ 보관

【포장단위】 5L

Glutaraldehyde 2.1%

제조원 **Huniz**

부산광역시 강서구 녹산산단 165로 22
T. 051-831-1030 | F. 051-831-1040

판매원

Huons

경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 901호(삼평동, 판교이노밸리)
T. 080-447-4700 | F. 02-6455-0740 | www.huons.com